

Tarjeta de instrucciones Ponseti® AFO

Instrucciones de uso:

- 1** Abra la órtesis para que todos los sujetadores de cuero queden libres para la inserción de los pies. Las hebillas deben ser colocadas en el lado interior del pie.
- 2** Tome la parte inferior de la pierna y deslice suavemente el pie en su lugar hasta que el talón quede ajustado contra las partes posterior y de abajo de la órtesis. (El talón quizás no pueda sentarse aplastado en el zapato hasta 2- 4 semanas).
- 3** Tire de la lengüeta horizontalmente contra el tobillo y mantenga en su lugar con el pulgar. Asegúrese de que el agujero en la lengüeta se encuentra por encima de la correa del medio.
- 4** Abroche la correa central sobre la lengüeta horizontal. Abroche la correa del tobillo.
- 5** Mire a través de la apertura del talón en la parte posterior de la órtesis para asegurar que el talón es totalmente abajo y hacia atrás. Si no, reajuste la lengüeta y correa del medio.
- 6** Una vez que las correas superiores estén muy ajustadas y el talón esté perfectamente en su lugar, abroche la correa de los pies y aprete las otras correas si es necesario. Luego enganche los zapatos sobre la barra.

